



Gene O + ossigeno

Trattamento del viso

Sistema di microdermoabrasore smartouch

La bellezza non accade si crea



Manuale d'uso

Manuale versione: Codice rif. GRD2021geneo Rev 1.0 del 11-04-2021



Le informazioni contenute nel presente manuale possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Si garantisce comunque che il manuale consegnato (SE&O) è quello corrispondente all'apparecchiatura installata. Le relative correzioni saranno incluse nelle nuove edizioni.

È vietata qualsiasi riproduzione senza autorizzazione scritta

La ringraziamo per la preferenza riservata alle nostre apparecchiature, studiate e costruite per rendere il più razionale possibile il Suo lavoro e per ridurre i consumi energetici ed i tempi operativi con ovvi benefici individuali e collettivi.

Siamo certi che queste apparecchiature Le daranno piena soddisfazione e risponderanno ad ogni Sua esigenza. Abbia comunque la certezza e la tranquillità di avere in ogni momento tecnici specializzati a Sua completa disposizione.

La invitiamo a consultare il presente manuale che Le sarà di valido aiuto per l'utilizzo ottimale e per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche della Sua Apparecchiatura.

Le auguriamo cordialmente buon lavoro.

Per ottenere i migliori risultati si consiglia di leggere e seguire le procedure d'uso riportate nel presente manuale. Si ricorda che, a norme internazionali, l'apparecchiatura è completamente protetta da qualsiasi anomalia di funzionamento; sono esclusi da tali protezioni gli errori di valutazione o di applicazione ovvero casi di assoluta particolarità non prevedibili a priori.



NOTA Il manuale d'uso del sistema **Gene O** deve essere letto attentamente, in ogni sua parte, prima di mettere in funzione l'apparecchio. Attenersi sempre a tutte le avvertenze e precauzioni

1.1 Convenzioni di scrittura



SOTTOLINEATURA

Per evidenziare alcune sezioni del documento si utilizza la sottolineatura.



NOTA

Le note mettono in evidenza alcune informazioni importanti contenute nel testo.



ATTENZIONE

I messaggi di attenzione appaiono prima di operazioni che, se non osservate, possono causare danni all'apparecchiatura e/o ai suoi accessori.



DIVIETO

Messaggi di divieto appaiono prima delle operazioni che non devono essere eseguite



AVVERTENZE

I messaggi di avvertenza segnalano operazioni o situazioni che, se non conosciute o non eseguite correttamente, possono causare problemi all'utente.



1.2 Conformità alle direttive comunitarie

L'apparecchio risulta in conformità con quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie comprese le ultime modifiche e con la relativa legislazione nazionale di recepimento:

DIRETTIVA 89/336/CEE Compatibilità elettromagnetica
 DIRETTIVA 73/23/CEE Bassa tensione
 DIRETTIVA 93/68/CE Marcatura CE 93-42 EEC

A questo apparecchio, per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica, sono state applicate le norme europee armonizzate EN 50081-1 e EN 50082-1 e per quanto riguarda la sicurezza, esso è conforme ai requisiti essenziali prescritti dalla DIRETTIVA 73/23 CEE, e alle prescrizioni normative della “Guida Generale per la sicurezza degli Apparecchi Elettrici per uso medicale” CEI 62-39, per quanto applicabile.

A questo apparecchio è stata apposta la marcatura **CE** ai sensi delle direttive sopracitate.

- **Direttiva 2001/81/CE** relativa ai limiti nazionali di emissione di inquinanti atmosferici;
- **Direttiva 2002/3/CE** relativa all'ozono nell'aria;
- **Direttiva 2008/1/CE** sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- **Direttiva 2008/50/CE** relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Dichiarazione di conformità

Si dichiara che l'apparecchiatura modello **sistema trattamento viso Gene O**
 è un apparecchio elettrico per uso estetico

Con particolare riferimento l'apparecchiatura è conforme alle direttive CE



E che è stato applicato lo standard di riferimento qui di seguito riportato.

CEI 62 - 39

Apparecchi elettrici per uso medicale. Requisiti generali di sicurezza.

Nome Prodotto	Sistema trattamento viso Gene O
Numero di Serie	
Data	
Classe di sicurezza elettrica	II BF



1.3 Simboli

La simbologia riportata sull'apparecchiatura è importante ai fini della sicurezza del dispositivo e del suo corretto utilizzo.



Attenzione consultare la documentazione annessa.



Parte applicata di tipo B



Radiazione non ionizzante



AVVERTENZE

Questo dispositivo non è protetto contro la penetrazione dei liquidi, evitare di spruzzare, o vaporizzare o utilizzare sostanze liquide nelle sue vicinanze. Qualora ci fosse il sospetto che liquidi siano penetrati all'interno del dispositivo, inviarlo immediatamente in assistenza tecnica.



AVVERTENZE

Questo prodotto deve essere utilizzato in stretta conformità con il metodo di utilizzo indicato in questo manuale, se si utilizzano metodi diversi l'abuso e tutte le conseguenze saranno vostra responsabilità, l'azienda non si assume alcuna responsabilità, non fornisce garanzie di alcun tipo, incluse garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare. La Società non si assume alcuna responsabilità per errori contenuti nel presente documento o per danni incidentali o consequenziali in relazione alla fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo manuale. Questo manuale contiene informazioni protette dalle leggi sui brevetti. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del manuale può essere fotocopiata, copiata o tradotta in un'altra lingua senza il consenso scritto dell'azienda.

Il contenuto del manuale può essere modificato senza preavviso per l'utente.

Responsabilità del produttore

La Società è responsabile delle prestazioni di sicurezza e affidabilità dello strumento solo nei seguenti casi: le operazioni di assemblaggio, riadattamento, e manutenzione sono eseguite da personale riconosciuto dalla Società, le apparecchiature elettriche pertinenti sono conformi alle norme Seguire le istruzioni.



ATTENZIONE

Questo è uno strumento di bellezza.

Se il personale che utilizza questo strumento non riesce a gestire una serie di procedure operative, può causare un guasto anomalo dello strumento e può essere pericoloso per la salute umana.



1.3.1 Prefazione

Questo manuale utente contiene tutte le informazioni generali su questo strumento. Questo è il punto di partenza per i nuovi utenti per iniziare a lavorare con lo strumento perché fornisce un'introduzione generale al sistema, spiega come funziona, descrive l'installazione dello strumento e i vari metodi di funzionamento. Questo manuale ha lo scopo di familiarizzare con questo strumento e di far diventare il personale esperto nell'uso delle apparecchiature di bellezza.

I seguenti simboli sono utilizzati nello strumento e nel manuale. Per un corretto utilizzo dello strumento, per evitare danni all'operatore e al paziente, per proteggere lo strumento da eventuali danni, in modo da evitare danni alla proprietà, prestare attenzione alla tipologia e al significato dei seguenti simboli.

 Avvertimento	Indica che possono verificarsi lesioni gravi a causa di errori operativi
 Pericolo	Indica che possono verificarsi lesioni gravi a causa di errori operativi
 Avviso	Si prega di controllare il manuale
	Il segno indica che è vietata l'operazione
	Il segno indica l'elemento di attenzione
	Indica che il tipo di protezione a cui appartiene il dispositivo è di tipo B.

1.4 Informazioni

1.1 Precauzioni per ambiente

- 1) Non utilizzare prese multiple, in modo da evitare cortocircuiti;
- 2) Quando si sostituisce il fusibile occorre spegnere l'interruttore generale di alimentazione;
- 3) Utilizzare un'alimentazione da 240 V \pm 10%, 50 Hz \pm 1 Hz e con presa di terra
- 4) L'uso di cavi di alimentazione danneggiati comporta il rischio di cortocircuiti, scosse elettriche;
- 5) Non piegare eccessivamente, torcere il cavo di alimentazione, per evitare cortocircuiti;
- 6) Quando lo strumento è allentato o danneggiato, contattare tempestivamente l'azienda;
- 7) Non utilizzare in ambienti instabili come piani con inclinazioni, vibrazioni, evitare urti;
- 8) Evitare che acqua o detriti penetrino nello strumento, in questo caso contattare l'azienda;
- 9) Quando si sposta lo strumento deve essere scollegata la spina di alimentazione
- 10) Lo strumento deve essere spostato delicatamente per evitare vibrazioni;
- 11) Lo strumento deve essere posizionato in un luogo stabile, lasciando almeno 5 cm distante da ostacoli per garantire che la circolazione dell'aria favorisca l'irraggiamento dello strumento;
- 12) Non appoggiare nulla sullo strumento per evitare l'ostruzione delle prese d'aria;
- 13) Evitare di utilizzare lo strumento nei seguenti ambienti: esposizione diretta alla luce solare; ambiente con alta umidità; ambiente vicino all'acqua; vibrazione, piano inclinato, ambiente con forte campo magnetico; con onde elettromagnetiche, ambiente a forte impatto di tensione; luogo di stoccaggio chimico, siti con gas corrosivi;
- 14) Non può essere utilizzato insieme ad altri strumenti (come microonde), in modo da evitare reciproche interferenze, che possono causare malfunzionamenti.



1.5 INFORMAZIONI SU GENE O + U

geneO + U è un sistema di micro dermoabrasione che fornisce soluzioni sicure, efficaci e semplici. La microdermo abrasione è un processo meccanico basato sul concetto di rimozione dello strato più superficiale delle cellule morte della pelle (strato corneo). Con questo processo il corpo interpreta questa attività come una lieve lesione alla pelle e inizierà a produrre nuove cellule della pelle sane per sostituire quelle eliminate.

GeneO + U è fornito anche una testina massaggiante che fornisce un aspetto più fresco e tonico.

GeneO + U è composto da 6 parti principali:

- 1) unità corpo
- 2) unità base
- 3) applicatore Oxy Geneo
- 4) alimentatore
- 5) testa massaggiatore
- 6) capsulgen

1.6 ISTRUZIONI DI SICUREZZA E CONTROINDICAZIONI

Questo è un dispositivo elettrico. Per ridurre il rischio di lesioni gravi occorre:

- Solo personale qualificato può utilizzare geneO + U. Per evitare l'utilizzo da parte di personale non qualificato, spegnerlo quando non è in uso.
- Utilizzare questo sistema solo per lo scopo previsto, come descritto in questo manuale. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per danni o lesioni derivanti da un uso improprio o imprudente.
- Non azionare, posizionare o conservare geneO + U vicino a qualsiasi fonte d'acqua.
- Prima della pulizia o della manutenzione, spegnere il geneO + U, quindi scollegare il cavo di alimentatore dalla presa elettrica.
- Utilizzare geneO + U solo con il cavo elettrico, l'alimentatore e gli applicatori forniti in dotazione
- Non è consentita alcuna modifica!
- Solo il personale qualificato e autorizzato può fornire assistenza tecnica
- Prima dell'uso, assicurarsi che il sistema e i suoi accessori non presentino danni visibili.
- In caso di difetti o malfunzionamenti, spegnere immediatamente il dispositivo.
- Spegnerlo prima di spostarlo.
- Non tirare il cavo di alimentazione o il sistema per scollegare la presa elettrica.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Quando si utilizza il sistema assicurarsi che le mani siano completamente asciutte.
- Non utilizzare il dispositivo sulle seguenti aree: seno, inguine, genitali, ascelle, sotto le sopracciglia, sopra le palpebre o bulbi oculari.
- Non azionare l'unità in presenza di interferenze elettromagnetiche. L'interferenza elettromagnetica può essere causata da elettrochirurgia, diatermia, risonanza magnetica o altre apparecchiature simili.
- Il tablet e il cellulare sono considerati apparecchiature di comunicazione in RF e possono influire sul funzionamento del sistema geneO + U.
- Non toccare durante il trattamento il connettore USB.

1.7 RISCHI DI INCENDIO

- Non utilizzare il sistema in presenza di materiali esplosivi o altamente infiammabili come alcol, metanolo, acetone, ecc.



1.8 CONTROINDICAZIONI

Non devono essere trattati pazienti che presentano le seguenti condizioni:

- Cancro della pelle o nei maligni.
- Donne Incinta o in allattamento.
- Pelli che presentano piaghe, eczema, eruzione cutanea, pelle fragile, bruciata o ferita, acne attiva, rosacea, dermatite, psoriasi o Herpes Simplex attivo.
- Prendere precauzioni quando si trattano aree con acne attiva grave.
- Abbronzatura eccessiva
- Disturbi vascolari nella zona da trattare quali: teleangectasie, vene varicose, trombosi, flebiti.
- Gravi malattie come: disturbi cardiaci e cancro. In questi casi, consultare il medico curante.
- Se recentemente nell'area trattata sono state eseguite procedure estetiche quali mesoterapia, peeling, resurface consultare il medico curante prima di utilizzare geneO +.


1.9 POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI

Raramente si possono avere effetti collaterali tuttavia, se si verificano, di solito sono temporanei:

- arrossamento o gonfiore eccessivo,
- prurito,
- pelle irritata,
- capillari visibili,
- sensibilità al tatto
- o cambiamento della pigmentazione.



2.1 Elenco componenti del Kit Geneo+U

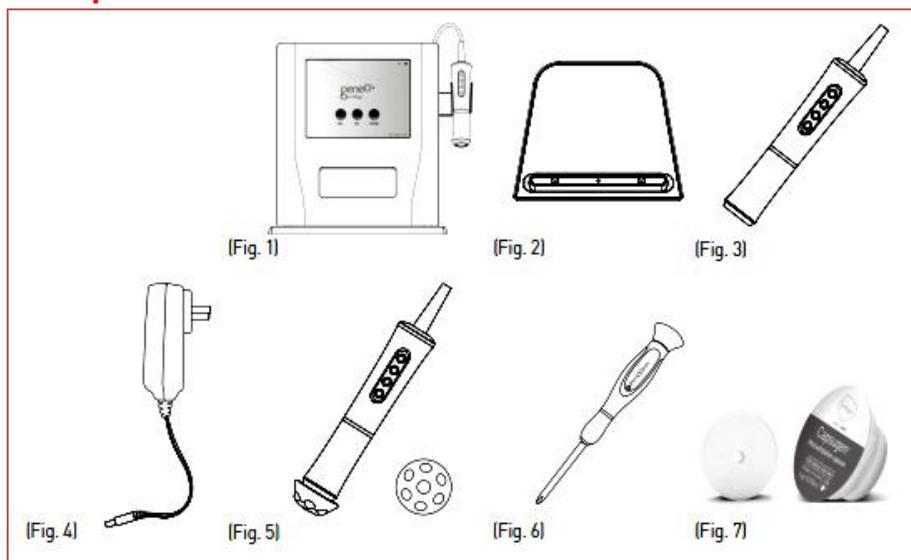

1. Unità Corporea geneO + U (Fig. 1)
2. Unità base geneO + U (Fig. 2)
3. Applicatore OxyGeneo (Fig. 3)
4. Alimentatore geneO + U (Fig. 4)
5. Manipolo massaggiatore (Fig. 5)
6. Cacciavite e viti (Fig. 6)
7. Capsulgen (Fig.7)

2.2 SPECIFICHE TECNICHE


Peso	~ 4,4 Kg
Dimensioni complessive	380 mm x 382 mm x 282 mm
Potenza in uscita	Frequenza 5 - 30Hz
Alimentatore	100-240 V ~ 50/60 Hz, 600 mA
Potenza in ingresso dell'alimentatore	12VDC, 2.0A
Temperatura di esercizio	5 - 30 ° C
Umidità operativa	20-80% di umidità relativa
Pressione atmosferica	80-106 KPa
Temperatura di trasporto e conservazione	-20 60 ° C
Umidità di trasporto e conservazione	5-90% di umidità relativa
Pressione atmosferica	50-106 KPa
Sicurezza elettrica: Classificazione	IEC 60601-1
Alimentazione classe	II

2.3 Etichette



2.4 ASSEMBLAGGIO GENE O + U

- Disimballare geneO + U e verificare che il sistema sia intatto e che tutti i componenti siano presenti.
- Si consiglia di conservare la scatola di imballaggio e i materiali per il trasporto futuro.
- Assemblare il geneO + U collegando l'Unità alla Base utilizzando le viti in dotazione e il cacciavite.
- Collegare il cavo dell'applicatore al connettore corrispondente sul retro del sistema
- Posizionare l'applicatore nel supporto
- Posizionare geneO + U su una superficie rigida stabile
- collegare l'alimentatore fornito al sistema.
- Collegare il cavo elettrico dell'alimentatore alla presa elettrica.

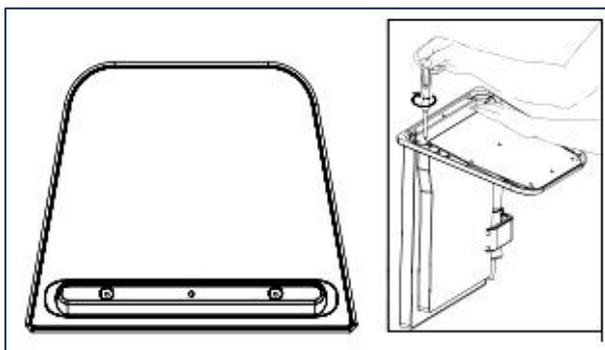

2.5 APPLICATORE OXYGENEO

L'applicatore OxyGeneo include un sistema unico di vibrazione. L'intensità della vibrazione può essere regolata in base alla sensibilità del cliente utilizzando il pulsante "+ o -" sull'applicatore (Fig.10A).


Per aumentare la vibrazione dell'applicatore si preme il "+" e per diminuire si preme il "-", la spia verde sull'applicatore lampeggia brevemente.

Premendo il pulsante Luce sull'applicatore si spegne e si riaccende l'indicatore luminoso della sessione.

Il colore della luce viene illuminato secondo le seguenti sedute:

NeoMassage:	rosso,
NeoRevive:	rosso,
NeoBright:	giallo.

Inserire la testina corretta all'applicatore prima di iniziare una sessione.

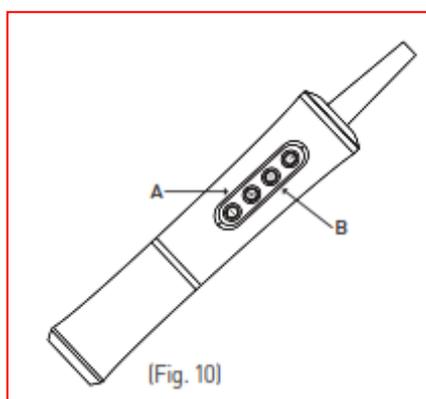

2.6 CAPSUGEN

Il contenuto di Capsugen è 6 gr. Ingredienti: bicarbonato di sodio, acido citrico, magnesio stearato.

Avvertenze:

- Solo per uso professionale
- Monouso
- Si consiglia un test di sensibilità 3 giorni prima del primo utilizzo in un'area nascosta. Se non sono evidenti irritazioni o infiammazioni, non esiste un'ipersensibilità al prodotto.
- Solo per uso esterno.
- Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto, sciacquare immediatamente con acqua fredda.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare in luogo fresco e asciutto, a temperatura inferiore a 30 ° C.
- Non utilizzare su acne o pelli sensibili.

Istruzioni Capsugen:

Detergi accuratamente la pelle. Una volta che la pelle è pulita, massaggia Capsugen sulla pelle pulita e umida almeno una volta alla settimana.

Testina massaggiatore

- Per uso professionale
- Per uso multiplo
- Solo per uso esterno.



3.1 SEQUENZA DI ACCENSIONE E CONTROLLO DEL SISTEMA

Prima di accendere geneO + U, verificare che l'alimentatore sia collegato all'ingresso del sistema posto sul pannello posteriore e alla presa di corrente. Il sistema deve essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito.

Portare il comando ON / OFF in posizione ON sul pannello posteriore (Fig.12).




NOTA Dopo il caricamento di GeneO + U, il touch screen diventerà bianco e quindi nero con l'intestazione SCREEN TEST come parte del controllo del sistema automatico del sistema. Verificare che lo schermo sia di buona qualità durante questi primi secondi di caricamento del sistema. Dopo il controllo del sistema, verrà visualizzata l'animazione "Expect More".

Una volta raggiunta la schermata principale, il sistema è pronto per l'uso.

3.2 SPEGNERE GENE O + U

Attivare il comando ON / OFF sul retro del sistema (Fig.12).

Rimuovere l'alimentatore dalla presa elettrica e scollegarlo dal geneO + U. Conserva il tuo geneO + U e i suoi accessori in un luogo fresco e asciutto.

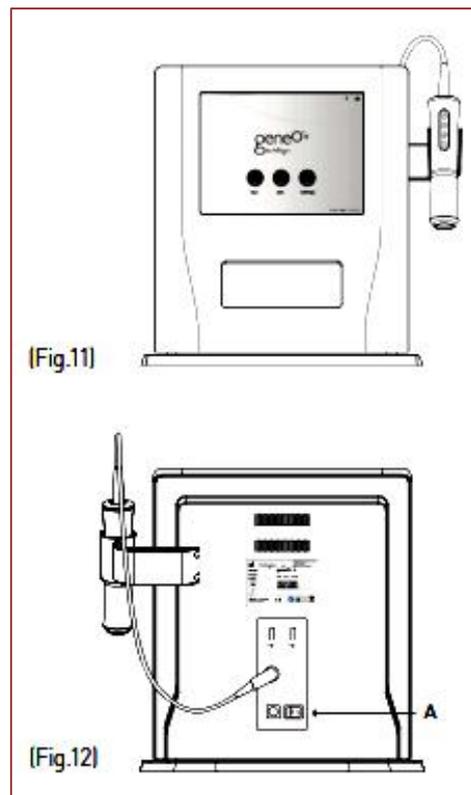

3.3 SCHERMATA INIZIALE

La schermata principale include quanto segue:

- **Esegui:** avvia le sessioni
- **Informazioni:** formazioni e marketing
- **Impostazioni:** parametri di sistema regolabili
- **L'icona Home:** si trova nella parte in alto a destra della maggior parte delle schermate, questa riporta l'operatore alla "Schermata iniziale".
- **Icona guida:** disponibile nella parte superiore delle schermate selezionate. Usa questa icona per ottenere informazioni dettagliate su come utilizzare queste schermate.
- **Icona Indietro:** si trova nella parte inferiore sinistra della maggior parte delle schermate. Riporta l'operatore alla schermata precedente.

L'ora, il giorno e la data vengono visualizzati nell'angolo in basso a destra di ogni schermata.

3.4 SELEZIONA L'APPLICAZIONE

Tocca ESEGUI e seleziona il tasto OxyGeneo evidenziato. Seleziona Sessione e vai alla schermata della sessione, tocca:

- NeoRevive,
- NeoBright
- o NeoMassage.



3.5 SCHERMATA DELLA SESSIONE DI OXYGENEO

Ogni sessione ha parametri predefiniti che possono essere modificati prima di iniziare la sessione.

- **Intensità:** ogni sessione ha un'intensità della potenza predefinita. Utilizza il sistema di scorrimento sullo schermo per regolare la potenza della sessione o usa i pulsanti "+" e "-" sull'applicatore.
- **Durata:** ogni sessione ha una durata predefinita. Usa il cursore sullo schermo per regolare la durata della sessione prima di iniziare il trattamento.
- **Esegui:** tocca ESEGUI per avviare una sessione
- **Fine:** tocca FINE per terminare una sessione
- **Modifica** - per modificare i parametri della sessione dopo l'inizio di una sessione, per sospendere la sessione utilizza il pulsante ON/OFF sull'applicatore e tocca MODIFICA sul messaggio "pop-up". Questo abiliterà le chiavi e sarai in grado di modificare i parametri della sessione. Per riprendere il trattamento premere RUN e quindi il pulsante ON / OFF sull'applicatore.
- **Tecnica di seduta:** muovi l'applicatore con movimenti circolari e lineari su tutta l'area usando una pressione molto lieve. Puoi anche rimanere per un po' su aree selezionate per ottimizzare l'effetto. Regola l'intensità in base all'area di trattamento e alla tolleranza del paziente.

Nel caso in cui non sia presente Disk On Key o DOK abbia un file errato / danneggiato, il sistema indicherà: "Nessun file valido trovato. Controllare DOK. Nessun avvio del sistema.



3.6 SCHERMATA DELLE INFORMAZIONI

Tutte le tecnologie saranno disponibili toccando INFO.


Seleziona la tecnologia desiderata: verrà visualizzato un elenco di contenuti:

- Video
- Manuale d'uso
- Guida rapida
- Seleziona la risorsa desiderata.
- Il modulo video offre 3 opzioni:
- Video del trattamento
- Video di marketing
- Video di formazione



3.7 SCHEMATA DELLE IMPOSTAZIONI

- **Lingue:** seleziona la lingua desiderata
- **formato data:** consente di impostare la data e il formato della data
- **formato ora:** consente di impostare l'ora e il formato dell'ora
- **Aggiornamento software:** selezionare questa opzione per aggiornare il software di sistema.
- **Calibrazione del pannello** - Seleziona per calibrare il pannello
- **Tecnico:** utilizzato per informazioni tecniche sul sistema (solo tecnico autorizzato)
- **Pay per use** - Opzione futura (attualmente disabilitata)
- **Luminosità:** regola la luminosità dello schermo utilizzando i pulsanti "+" e "-"
- **Volume** - Regola i segnali acustici di avviso utilizzando le icone "+" e "-".

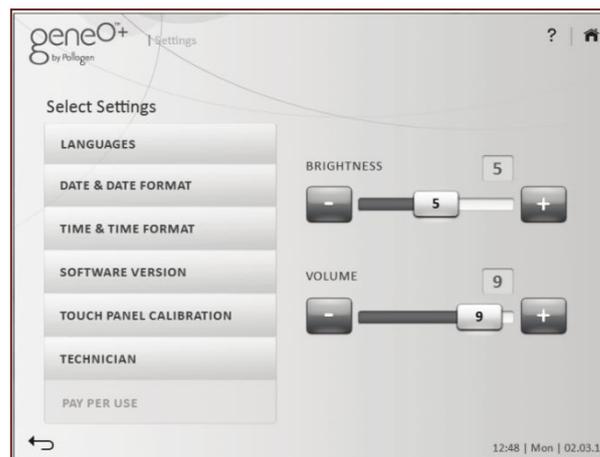

3.8 SCHEMATA DELLA LINGUA

Selezionare la lingua desiderata e premere "FATTO".




3.9 SCHEMATA FORMATO DATA E DATA

Consente all'operatore di selezionare tra i formati della data: GG.MM.AA o MM.GG.AAA.
Per impostare la data: Selezionare la data corrente e premere "FATTO".



3.10 SCHERMATA FORMATO ORA E ORA

Consente all'operatore di selezionare tra i formati dell'ora: formato 24 ore o formato 12 ore. Per impostare l'ora: Selezionare l'ora corrente e premere "FATTO".

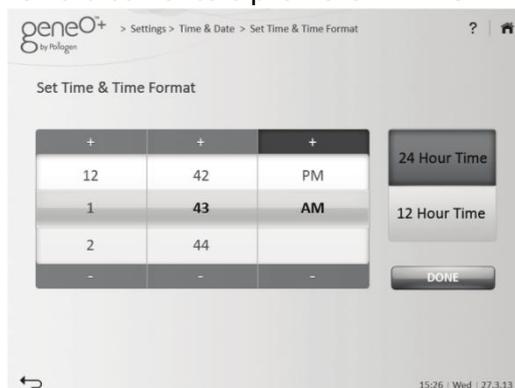

3.11 SCHERMATA DI AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

Visualizza le versioni SW correnti (GUI, Linux e applicatore). Per aggiornare il SOFTWARE del sistema inserire il Disk On Key in una qualsiasi delle porte USB sul retro della piattaforma e toccare il tasto "AGGIORNAMENTO SOFTWARE".

La prima indicazione che riceverai è: "Aggiornamento SW, attendi".

Se il SOFTWARE è stato installato con successo il sistema indicherà: "SW aggiornato con successo, il sistema si riavvierà ora". Verificare la versione del software aggiornata sullo schermo: versione della GUI.

Dopo aver toccato OK, il sistema si riavvierà, attendere che appaia HOMESCREEN.

Se il SOFTWARE non è stato installato con successo per qualsiasi motivo, il sistema indicherà: "Assicurati di aver collegato il disco Sulla chiave di una qualsiasi delle porte USB".

In caso di caricamento del programma errato o incompleto durante il caricamento di una versione del programma utilizzando una presa USB, riavviare il sistema.



3.12 TARATURA DEL PANNELLO A SFIORAMENTO

Per la calibrazione dello schermo toccare il simbolo di calibrazione (+) e assicurarsi di toccare il centro del simbolo di calibrazione.

3.13 TECNICO

Utilizzato per le informazioni tecniche di sistema, per procedere è necessario un codice.

3.14 PAGA PER USO

Opzione futura (attualmente disabilitata).



4.1 CURA E MANUTENZIONE

Pulisci il sistema almeno una volta alla settimana. Spegnerne il sistema e pulire tutte le superfici con un panno morbido, umido e non abrasivo. Fare attenzione a non versare liquidi su geneO + U. Assicurarsi che l'acqua non entri mai all'interno del sistema. Assicurarsi che il sistema sia completamente asciutto prima del prossimo utilizzo. Dopo ogni trattamento pulire e disinfettare la testina massaggiatrice secondo la seguente procedura:

1. Scollegare la copertura in silicone della testina dalla sua base di plastica.
2. Pulire con acqua e soluzione detergente fino a quando non è visivamente pulito.
3. Utilizzare un panno morbido e asciutto per asciugare la testina.
4. Utilizzare un panno morbido, inumidito con alcol al 70%, per disinfettare la testa.
5. Utilizzare un panno morbido e asciutto per asciugare la testina.

Il Capsugen è monouso. La cura e la manutenzione non è richiesta.

4.2 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Guasto	Possibile causa del guasto	Azione
geneO + U non si accende	Verificare che l'alimentatore sia collegato al dispositivo e a una presa a muro funzionante Verificare che l'interruttore ON / OFF sul dispositivo sia acceso.	Passa a un'altra presa a muro. Se ancora non funziona, chiama il servizio tecnico
Messaggio di errore di comunicazione	Verificare che l'applicatore sia collegato e bloccato Verificare che un led verde sull'applicatore sia acceso.	Se l'applicatore è collegato e il LED verde è acceso ma è ancora presente un errore di comunicazione, spostare l'applicatore sull'ingresso alternativo e ricontrollare. Se non si risolve il problema, chiama il servizio tecnico
Impossibile avviare la sessione	Dopo aver premuto RUN, verificare che il led verde sull'applicatore sia passato da un verde fisso in verde lampeggiante.	Se il led verde rimane fisso, spegnere il dispositivo, scollegare l'applicatore e ricollegarlo all'ingresso alternativo e ricontrollare. Se si risolve il problema, chiamare l'assistenza Se il led verde lampeggia e si è premuto il pulsante ON/OFF sull'applicatore e la sessione ancora non si avvia, chiamare l'assistenza tecnica.
Impossibile esportare file in DOK. Solo per personale di assistenza certificato	DOK non è formattato. DOK è protetto da scrittura	Formatta DOK e riprova. Disabilita la funzione di protezione da scrittura su DOK.
Il software non può essere aggiornato	Verifica che DOK sia connesso al dispositivo Verificare che si stia tentando di aggiornare una versione software superiore.	Se un DOK valido è collegato a una versione superiore a quella già installata, ma l'aggiornamento non viene ancora eseguito, passare a un'altra porta e riprovare. Se non aiuta, chiama l'assistenza.
Errore di visualizzazione	Guasto del TOUCH SCREEN, dati parziali visualizzati sul TOUCH SCREEN	Spegnere il sistema e poi riaccenderlo. Se il display continua a non funzionare correttamente, chiamare l'assistenza.
Il sistema non può essere spento	Guasto dell'interruttore ON / OFF, il sistema non può essere spento	Scollegare il dispositivo e chiamare l'assistenza.
Nessuna indicazione LED verde sull'applicatore	LED verde non funzionante, nessuna indicazione ON / OFF dell'applicatore	Verificare la connessione dell'applicatore al sistema. In caso di LED verde non funzionante, chiamare l'assistenza.



4.3 GARANZIA E ASSISTENZA CLIENTI TERMINI DELLA GARANZIA

Questo prodotto è garantito come tecnologia OxyGeneo, la tecnologia più avanzata sul mercato, ed è stato sottoposto a severi controlli di qualità eseguiti dal produttore. Per questo motivo, il distributore geneO + U garantisce nel tuo paese il corretto funzionamento di tale prodotto per 12 mesi dalla data di acquisto. Se si utilizza correttamente il dispositivo, e si seguono tutte le istruzioni del manuale dell'utente, è possibile usufruire del prodotto con la massima soddisfazione. Questa politica qualora si verificassero guasti imputabili a difetti di fabbricazione, si garantisce il supporto sul dispositivo geneO + U. In tal caso, avrai il diritto di utilizzare appieno i vantaggi di questa garanzia. Ciò implica la sostituzione gratuita delle parti (sia per l'assistenza che per le parti) presso qualsiasi Centro di assistenza autorizzato. Entro il suo periodo di validità, hai il diritto di utilizzare la garanzia, se necessario, per avere un prodotto pienamente funzionante, a condizione che siano rispettate le procedure sopra indicate. Questa garanzia è valida per il dispositivo geneO + U commercializzato dal distributore nel tuo paese.

4.4 SERVIZIO CLIENTI

Nel caso in cui il tuo geneO + U non funzioni correttamente, controlla quanto segue:

1. Assicurarsi che tutti gli accessori siano ben collegati al dispositivo.
2. Verificare che il cavo elettrico sia saldamente collegato al dispositivo.
3. Assicurarsi che il pulsante di accensione sia stato premuto. Altrimenti, contattare il distributore locale per assistenza.

4.5 LA GARANZIA NON È VALIDA QUANDO

1. Modifiche alla politica di garanzia, ricevuta di vendita o fattura o assenza di uno qualsiasi di questi documenti originali.
2. Danni o deterioramento del dispositivo dovuti a un uso improprio o se il dispositivo è stato modificato o riparato da una terza parte non autorizzata.
3. Danni al prodotto dovuti a difetti verificatisi durante il trasporto, come urti, colpi o manipolazione impropria.
4. Danni dovuti all'umidità o qualsiasi tipo di liquido, corpi estranei all'interno del dispositivo o l'uso di accessori non approvati e sconsigliati con il dispositivo in contrasto con il Manuale dell'utente.
5. Quando il dispositivo non viene utilizzato in conformità con il rispettivo manuale utente o con i suoi accessori in dotazione.
6. Danno o perdita parziale o totale del dispositivo, a causa di disastri naturali (come terremoti, inondazioni, incendi, fulmini, ecc.), Forza maggiore o incidente.
7. Danneggiamento del dispositivo dopo essere stato sottoposto ad ambienti con elevata presenza di polvere, umidità o applicazione di tensione eccessiva dalla presa di alimentazione.
8. Se il numero di serie del prodotto è stato modificato o cancellato.
9. A danni estetici, inclusi ma non limitati a graffi e ammaccature.



5.1 Precauzioni prima dell'uso

- 1) Assicurarsi di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di accendere la macchina. L'operatore deve conoscere le istruzioni operative e le modalità operative, l'apparecchiatura deve essere gestita da una persona preparata;
- 2) Impostare i parametri operativi sotto la guida di professionisti specializzati;
- 3) Prima dell'uso controllare che lo strumento sia in funzionamento normale;
- 4) Verificare che il collegamento della presa di terra sia corretto;
- 5) Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati e sicuri;

5.2 Precauzioni in uso

- 1) Quando lo strumento ha delle anomalie durante l'operazione, l'operatore deve premere l'interruttore di arresto e interrompere l'uso dello strumento.
- 2) Durante il funzionamento dello strumento, è necessario osservare costantemente la situazione del cliente e dello strumento e tenere d'occhio se si verificano situazioni anomale;
- 3) Si prega di non utilizzare lo strumento da parte di un operatore non abilitato e da personale diverso del tecnico operativo.

5.3 Precauzioni dopo l'uso

- 1) Dopo l'intervento, il manipolo viene riposto nel supporto.
- 2) Il manipolo deve essere pulito dopo, pronto per l'uso successivo

5.4 Precauzioni guasto, conservazione, ispezione

- 1) Non utilizzare lo strumento se vi sono delle anomalie. In caso di odore di fumo per cortocircuito, se si continua a utilizzare, c'è il pericolo di scosse elettriche. Si prega di premere rapidamente il pulsante di arresto, spegnere l'alimentazione, scollegare la spina di alimentazione e contattare immediatamente l'azienda o il distributore;
- 2) se non sei un tecnico non è possibile riparare e rimontare lo strumento, l'interno dello strumento non deve essere smontato
- 3) Controlla regolarmente lo strumenti e i componenti
- 4) Non utilizzare strumenti di pulizia che danneggiano il rivestimento protettivo dello strumento, come spazzole rigide;
- 5) Se lo strumento non viene utilizzato per più di 2 settimane, lo strumento deve essere ispezionato attentamente prima che possa essere riutilizzato.

5.5 Preparazione trattamento:

lavabo, asciugamano detergente (o lenzuolo di cotone bagnato), tovagliolo di carta asciutto, alcool (95%), batuffolo di cotone, vassoio con prodotto, pennello per il prodotto, testina massaggiante in gomma, glicerina (gel speciale), guanti monouso, specchio, ecc.

- ① utilizzare alcol per detergere il manipolo massaggiante in gomma
- ② usa alcol per disinfettare gli strumenti e i manipoli RF
- ③ Stendere il prodotto per la pulizia e sciacquare senza lasciare tracce di acqua
- ④ mettere il gel nella piastra pulita
- ⑤ utilizzare il manipolo massaggiante monouso a bolla aperta e installata sull'impugnatura
- ⑥ macchina accesa e in stato di standby



5.6 Pulizia del viso

- ① Utilizzare prodotti per la pulizia, pulire accuratamente il viso e asciugare.
- ② Utilizzare per un 1 minuto massaggio lenitivo al viso.

5.7 Il primo passo: pulizia profonda, ringiovanimento, importazione

- ① Utilizza il pennello e distribuire uniformemente il gel sulla zona della pelle da trattare. Si utilizza una sacca di circa il 60% del volume del gel, con uno spessore della pelle di circa 1 mm.
- ② Selezionare la modalità **OxyGeneo**, nel menu sul monitor, selezionare l'utilizzo dei prodotti (Neo luminosità o Neo rivitalizza) corrispondenti al trattamento. Normalmente non utilizzare l'energia già impostata, ma regola a seconda della sensibilità del cliente e regolare la frequenza della vibrazione.
- ③ Accendere l'interruttore manuale, massaggiare la pelle con il manipolo a bolle fino alla fine del tempo programmato.
- ④ eliminare i residui di prodotto dall'area di trattamento. Mantieni il viso pulito e asciutto.

5.8 Il secondo passo: aprire i pori, rimuovere le rughe, rassodare la pelle

- ① Ricopri in modo uniformemente l'area da trattare di glicerolo (Gel di preparazione)
- ② Selezionare il programma TriPoall, in base alla parte da trattare selezionare le diverse aree (viso / collo / seno/ mani décolleté). Normalmente non utilizzare l'energia già impostata, ma regola a seconda della sensibilità del cliente, Le spie della temperatura (luci ambra) si accendono in tutte le zone in sequenza e durano 5 secondi.

5.9 Sequenza trattamento del volto: (tre linee più due parti)

Contorno (si inizia dal mento sino ad arrivare all'angolo della mascella)

Definizione Linea (dal mento al naso)

Muscolo delle gote (dal naso all'orecchio medio)

Zona della fronte (usare il manipolo con una leggera pressione, per evitare una sensazione di fastidio causata dalla pressione)

Borse sotto gli occhi dalla parte inferiore della palpebra all'orecchio medio (il focus è sulle zampe di gallina).



NOTA l'energia deve essere regolata partendo dal livello BASSO.



ATTENZIONE Evitate la zona degli occhi.

Utilizzare un panno asciutto per eliminare la glicerina in eccesso (Gel di preparazione).

5.10 La terza fase: massaggio potente, importazione del prodotto sulla pelle

- ① Riporre il manipolo massaggiante a bolle, e utilizzare il manipolo massaggiante in gomma.
- ② Utilizzare un pennello per applicare in modo uniforme il gel sulla pelle dell'area da trattare. In questa fase si utilizza una sacca con gel al 30%, utile per uno spessore della pelle di circa 0,5 mm.
- ③ Selezionare la modalità OxyGeneO, nel menu sul monitor, selezionare la modalità NeoMassage. Regola l'intensità della corrente e la frequenza in funzione della sensibilità del cliente.
- ④ Dopo che il gel è stato completamente assorbito, pulire la pelle.

5.11 Dopo il lavoro di trattamento

- ① posizionare una maschera facciale rigenerante per almeno 5 minuti.
- ② rimuovere la maschera, pulire e asciugare la pelle, massaggiare per 1 minuto.
- ③ fornire assistenza quotidiana al cliente (trucco di base).



6.1 introduzione

Progettato pensando al professionista dell'estetica, geneO + integra la nuova tecnologia brevettata OxyGeneo con la tecnologia TriPollar. GeneO + offre alla pelle un nutrimento e un'ossigenazione superiore con risultati clinicamente testati di anti età

6.2 Applicazioni

La combinazione di TriPollar RF con OxyGeneo migliora la qualità della pelle sia a livello dell'epidermide che degli strati del derma offrendo risultati di lunga durata.

6.3 OxyGeneo:

È un trattamento per la cura della pelle per nutrire, vitalizzare e idratare attivamente la pelle

- Esfoliazione dello strato esterno della pelle
- Infuso di nutrienti rivitalizzanti
- Ossigenazione della pelle generata dall'interno

6.4 TriPollar:

È la tecnologia anti età a Radio Frequenza di terza generazione utile nel trattamento

- Riduzione delle rughe
- Rassodamento della pelle
- Sicuro, efficace e piacevole

